



СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Аппарат

Xpert аппарат - это высоковольтная электропорация и фото-биостимуляция. Это устройство приводит к лучшей трансдермальной доступности а излучаемый цветовой свет производит эффект биостимуляции :

- **Красный свет 645 нм (610-760 нм)** влияет на процесс старения кожи - провисание кожи, изменение коллагена, растяжки, шрамы, морщины, способствует заживлению повреждений кожи, расщеплению жиров, действует против целлюлита и стимулирует рост волос.
- **Зеленый свет 520 нм (500-570 нм)** влияет на меланодермию и другие проблемы пигментации, раздражение кожи и покраснение, чувствительная кожа, мешки под глазами, темные круги, провисание кожи.
- **420 нм синего света (400-500 нм)** действует против угрей и прыщей убивая бактерии, подходит для использования с жирной кожей.

2. Классификация

- Тип защиты от поражения электрическим шоком: оборудование II класса.
- Частичная защита от поражения электрическим током.
- Защита от проникновения воды: основная часть аппарата.
- Режим работы: постоянный и непрерывный.

3. Технические данные

- Название продукта: Fusion Mesotherapy XPERT.
- Зарядка: литиевая батарея.
- Ток: от источника переменного тока 220V до 4,2V постоянного тока.
- Вес: 153 гр.
- Размеры: 24 x 6 x 3,2 см.
- LCD экран
- Гарантия: 1 год.

4. Комплектация

- Аппарат
- Блок питания
- Металлическая головка





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключение

- Подключите зарядное устройство к аппарату.
- Подключите аппарат к розетке переменного тока.

2. Выполнение процедуры

- Перед каждым использованием очистите металлическую головку аппарата дезинфицирующим средством.
- Установите металлическую головку в аппарат.
- Аппарат может быть использован с питанием от литиевой батареи либо подключив зарядное устройство.
- Включите аппарат нажав кнопку ON / OFF .

- Нажмите на кнопке управления левый клавиш, войдёте в главное меню.

- 1. MESO LEVEL** (уровень мезотерапии)
- 2. POLARITY** (полярность +/-)
- 3. LED**
- (I) TIME 00:00:00** (фиксируется время работы)

- Для выбора нужных параметров нажмите клавиши вверх / вниз.
- Нажмите левый клавиш, войдёте в sub-меню.

- 1. SUPERFICIAL (S) поверхностный**
- 2. MEDIUM (M) средний**
- 3. DEEP (D) глубокий**
- 4. INTENSIVE (I) интенсивный**

- Для выбора нужных параметров нажмите клавиши вверх / вниз.
- Чтобы начать процедуру, нажмите центральную клавишу на кнопке управления. Начав процедуру, вы войдете в меню для выбора остальных параметров.

- 4. MESO LEVEL** (уровень мезотерапии)
- 5. POLARITY** (полярность +/-)
- 6. LED** (красный, зеленый, синий)


- остальные параметры выбираются идентично.
- Выбор полярности + / -зависит от состояния кожи и выбора процедуры. Положительный (+) полюс успокаивающее средство для более жирной кожи, так как сужает поры, замедляется циркуляцию крови. Отрицательный (-) полюс стимулирует, открывает поры, стимулирует циркуляцию крови.
- Поток света можете выбрать в соответствии с желаемой процедурой, также можно работать только со световой терапией и без световой терапии.
- Когда закончите процедуру, просто нажмите правую кнопку.



ВАЖНО!

Во время процедуры электропорации, обязательно используйте продукт, который будет контактировать с головкой аппарата (неприкасайтесь головкой к сухой коже). Одной рукой возьмитесь за электроды на корпусе аппарата, другой рукой прикоснитесь к пациенту, таким образом создадите электрическую цепь.

Если процедуру проводит одно и то же лицо (сам себе), используйте продукт для контакта с головкой аппарата. Прикасайтесь только к электродам на корпусе аппарата, другой рукой прикасаться не надо.

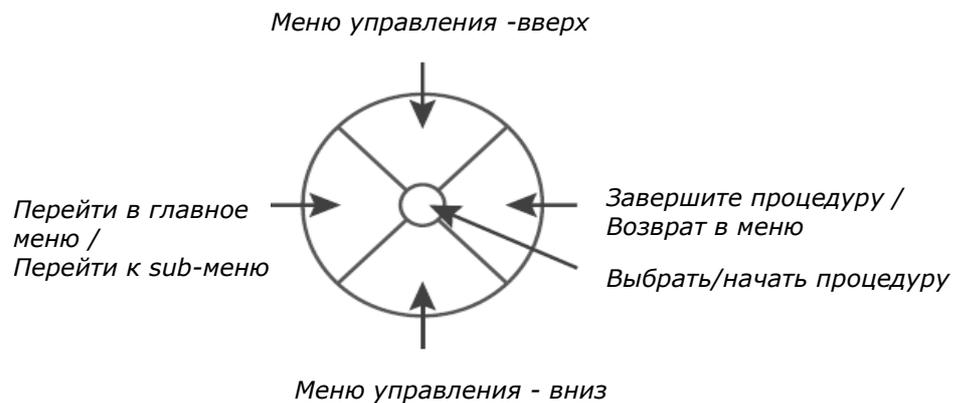

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ FUSION MESOTHERAPY, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Меры предосторожности

- Не держите аппарат рядом с источником тепла
- Аппарат храните в сухом и чистом месте.
- Не пытайтесь открыть или разобрать аппарат.
- Не используйте аппарат без перчаток.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не работайте с аппаратом, если руки или пальцы мокрые.
- Не используйте аппарат если его корпус или блок питания повреждены.
- Перед каждым использованием, очистите аппарат с дезинфицирующим средством.
- Хранить в местах недоступных для детей.

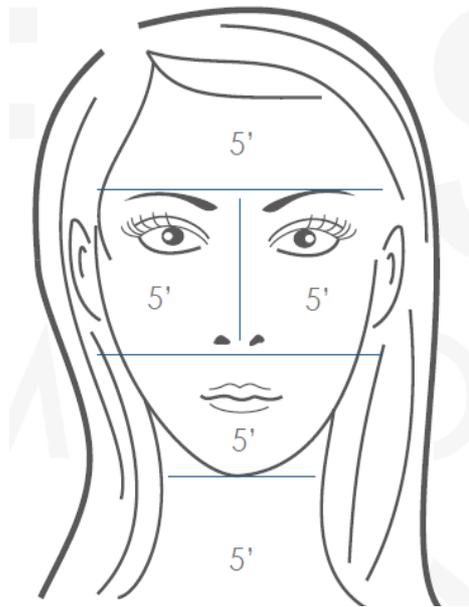


Рис.1. Рекомендуемое время

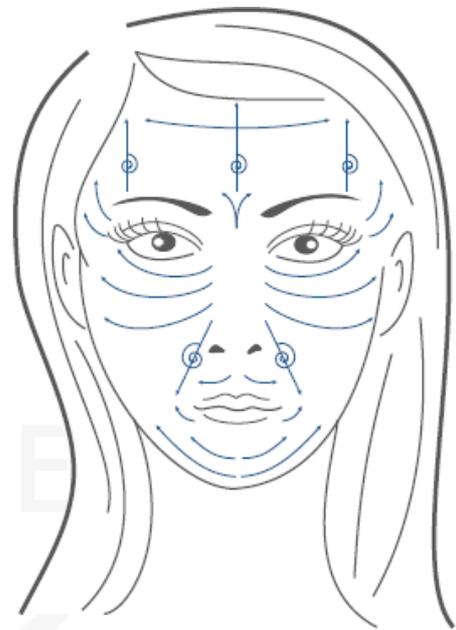


Рис.2. Рекомендуемые движения

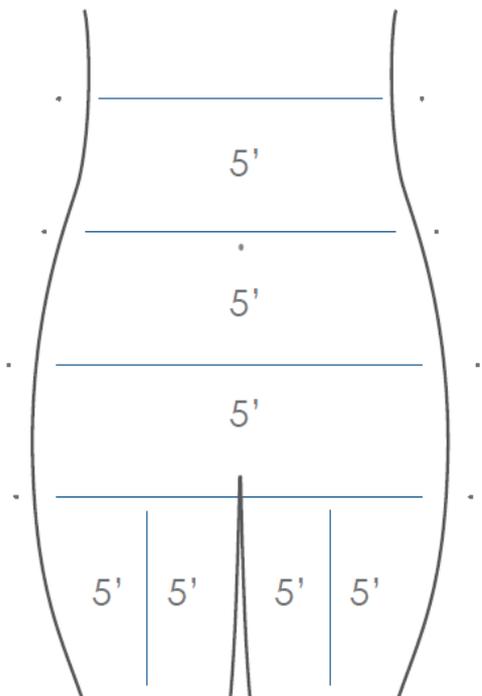


Рис.1. Рекомендуемое время

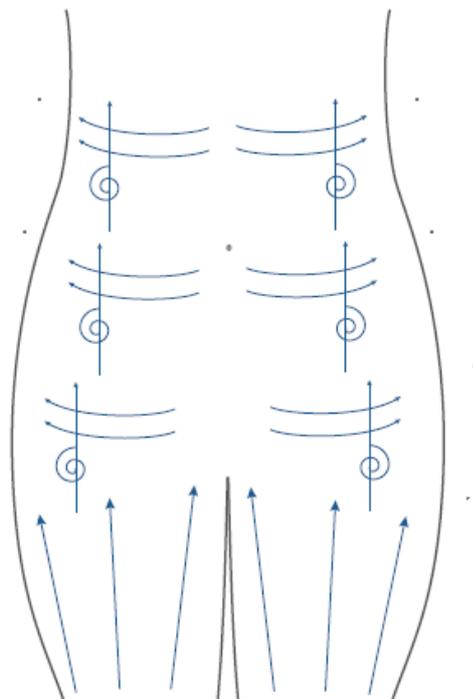


Рис.2. Рекомендуемые движения